

CACIPLIQ20[®] is het eerste medische hulpmiddel gebaseerd op ReGeneraTing Agents (RGTA[®]) technologie. CACIPLIQ20[®] herstelt het lichaamseigen genezingsproces door de extracellulaire matrix in het wondgebied te beschermen. CACIPLIQ20[®] is daardoor bij uitstek geschikt voor het genezingsproces van alle chronische wonden, bijvoorbeeld diabetische-, veneuze- of arteriële ulcera en decubituswonden. Klinische trials tonen aan dat binnen 4 weken het genezingsproces begint.

CaseStudie Wilma Ruigrok
Nurse Practioner Dermatologie
Albert Schweitzer Ziekenhuis



Uitgangssituatie

O/09-09-'10: Vrouw 74 jaar, Diabetes mellitus type 2

Verschijnt op de poli dermatologie i.v.m. niet genezende wond aan de rechter enkel. Mw is 4 wkn geleden gevallen met de fiets, waarna schaafwond van ong. 10 cm lang, 6 cm breed en 1 cm diep is ontstaan. In eerste instantie is de wond door de huisarts behandeld met vetgaas. Na 1 week meer pijn, roodheid om de wond en meer wondvocht. Het been werd ook dik. Door huisarts antibioticakuur voorgeschreven en mw moest rust houden met het been hoog. Na 1 week nog geen verbetering in pijn, de wond werd dieper en meer wondvocht. Verwijzing door huisarts naar poli dermatologie.

Kleur wond:	70% geel, 30 % rood
Exsudaat:	Matig
Oedeem:	Gehele onderbeen
Wondomgeving	Roodheid om de wond
Wondranden:	Ontvelde huid om de wond door exsudaat
Pijn:	8 op numerieke schaal
Infectie:	Positief

B/Wondbehandeling:

Zink om de wond, Hydrofiber verband met zilver, Absorberend Verband, Ambulant Compressief verband.
Pijnbestrijding: Paracetamol 4dd 1000 mg
Mobiliseren: zoveel mogelijk in beweging
Na 1 week aanpassing van pijnmedicatie naar Zaldiar tabletten 2 dd 1 + Paracetamol 2 dd 1000 mg
Na 2 weken oedeem sterk verminderd. Ambulant compressief verband gestopt, over op steunkous

O/23-09-'10:

Afmeting:	8 x 5 x 1 cm
Kleur wond:	50% geel, 50 % rood
Exsudaat:	Matig
Wondomgeving:	Geringe roodheid
Wondranden:	Licht geïrriteerd
Pijn:	5 op numerieke schaal
Infectie:	Negatief

B/Wondbehandeling:

Zink om de wond, Hydrofiber verband met zilver, Absorberend Verband, Steunkous.
Pijnbestrijding: Zaldiar 2 dd 1 + Paracetamol 2dd 1000 mg
Mobiliseren: zoveel mogelijk in beweging.


O/26-10-'10

Afmeting:	6 x 4 x 0,5 cm
Kleur wond:	85 % rood, 15 % geel
Exsudaat:	Matig
Wondomgeving:	Geringe roodheid
Wondranden:	Licht geïrriteerd
Pijn:	4 op numerieke schaal
Infectie:	Negatief

B/Wondbehandeling:

Bethamethasoncreme om de wond
Start Caciqliq
Absorberend verband, Steunkous

CaseStudie Wilma Ruigrok
Nurse Practioner Dermatologie
Albert Schweitzer Ziekenhuis

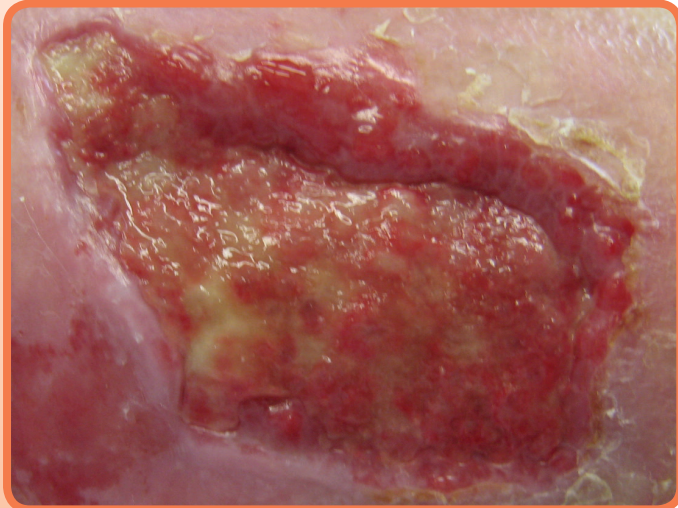


Start behandeling

Datum:	26-10-'10
Afmeting van de wond :	6 x 4 x 0,5 cm



Eerste week

Datum:	01-11-'10
Afmeting van de wond :	5 x 3 x 0,2 cm
Kleur wond:	100 % rood
Exsudaat:	Gering
Wondomgeving:	Roodheid om de wond gering
Wondranden:	Goed
Pijn:	4 op numerieke schaal
Infectie:	Negatief
Behandeling:	Zink om de wond Start Caciqliq 2x per week Absorberend verband Steunkous
Pijnbestrijding:	Zaldiar 2 dd 1
Mobiliseren:	Zoveel mogelijk in be- weging

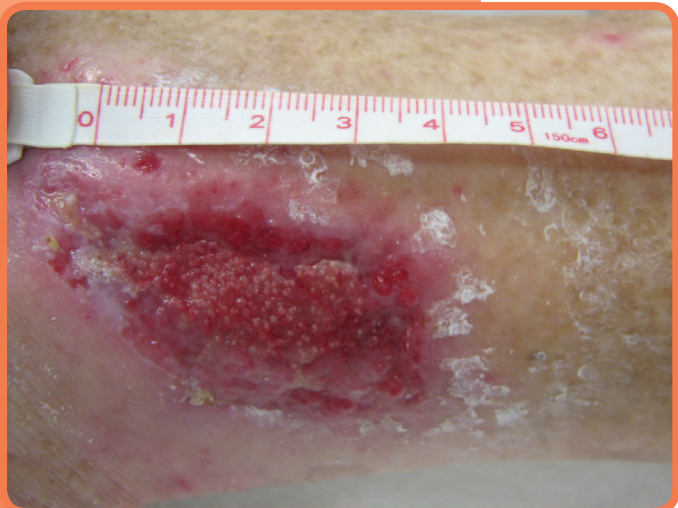

Derde week

Datum:	16-11-'10
--------	-----------

CaseStudie Wilma Ruigrok
Nurse Practioner Dermatologie
Albert Schweitzer Ziekenhuis



Vijfde week

Datum: 30-11-'10



Zevende week

Datum: 17-12-'10



Tiende week (eind controle)

Datum: 04-01-'11
Vordering: Practisch dicht